


AVVERTENZA IMPORTANTE

Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, dopo ogni utilizzo è necessario eseguire attentamente le seguenti fasi di pulizia della "testina di nebulizzazione" e della "camera porta farmaco"

A – Aprire la camera porta farmaco ed estrarre la testina di nebulizzazione.



B – Lavare la testina di nebulizzazione e la camera porta farmaco, immergendo i due componenti per alcuni minuti in acqua calda e sapone e rimescolando gli stessi prima di risciacquarli.

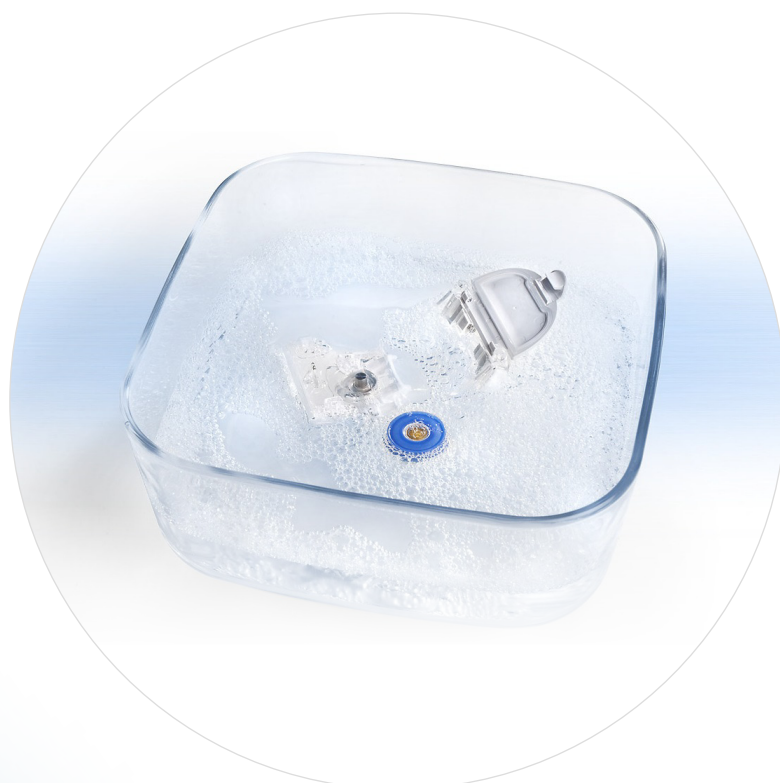

C – Risciacquare la camera porta farmaco e la testina di nebulizzazione sotto l'acqua corrente tiepida.



D – Prima di assemblare l'apparecchio, eliminare per quanto possibile gli eventuali residui d'acqua scuotendo separatamente la camera porta farmaco e la testina di nebulizzazione



E – Per evitare incrostazioni sulla testina di nebulizzazione accendere l'apparecchio attivando la nebulizzazione per alcuni secondi, sino alla completa eliminazione dei residui d'acqua rimasti sulla testina stessa.



F – Infine, per completare l'asciugatura dei componenti citati, rimuovere la camera porta farmaco dall'apparecchio e la testina di nebulizzazione e porre il tutto su un tovagliolo di carta pulito sino alla completa asciugatura.

